

 VNIVERSIDAD D SALAMANCA <small>CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL</small>	PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		PPRL-009
	Edición: 1	Fecha: 3 de diciembre de 2014	Página 1 de 19
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN CONTROL Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS			

ANEXO II LISTA DE COMPROBACIÓN DEL USUARIO

Desfibrilador: LIFEPAK CR® PLUS



Número de serie del desfibrilador. _____

Centro/Edificio _____

Instrucción	Medida correctora recomendada	Fecha				
		Iniciales				
1 Compruebe si aparece en el indicador de estado: El símbolo OK El símbolo CHARGE-PAK El símbolo de ATENCIÓN El símbolo de LLAVE INGLESA	Ninguna. Cambie el cargador de batería CHARGE-PAK™ y el paquete de electrodos QUIK-PAK™. Consulte las instrucciones de funcionamiento.					
2 Compruebe la fecha de caducidad de todos los paquetes de electrodos.	Si la fecha ya ha pasado, cambie el paquete de electrodos y el CHARGE-PAK.					
3 Compruebe los demás accesorios.	Sustituya los que hagan falta.					
4 Inspeccione el desfibrilador para comprobar si existen: Daños o fisuras Sustancias extrañas	Póngase en contacto con el personal de servicio técnico autorizado. Limpie el dispositivo.					
5 Otras:						

Imprimir lista comprobación